

Remodelación corporal y facial

Cabezales

UltraSpeed: combina un nuevo tipo de tecnología de ultrasonidos que emite ondas ultrasónicas guiadas, presenta un aplicador con placa extra grande para un remodelado de alta velocidad de áreas de tratamiento especialmente extensas.

UltraFace: combina las tecnologías de ultrasonidos de compresión y onda de corte para remodelar el rostro. Un transductor de ultrasonidos se fija a un aplicador del sonotrodo para emitir energía en profundidad debajo de la piel.

UltraBody: combina las tecnologías de ultrasonidos de compresión y onda de corte con una mayor emisión de potencia para remodelar el cuerpo.

UniBody: combina la tecnología de radiofrecuencia UniPolar de alta potencia con un anillo masajeador rotativo desmontable para ofrecer un calentamiento dérmico profundo e incrementar al mismo tiempo la circulación dentro del tejido subcutáneo.



Cortesía del Departamento Clínico de Alma

Resurfacing/rejuvenecimiento de la piel

Cabezales

Microplasma: la radiofrecuencia pixelada realiza una ablación y calienta la piel con la tecnología de microplasma.

Microplasma+IMPACT: combina microplasma con la tecnología de ultrasonido IMPACT para obtener mejores resultados.



Cortesía de Dra. Lehaviv Akerman, Jefa del Departamento de Dermatología del Rothchild Medical Center, Israel

Tensado de la piel

Cabezales

CoaxiPolar: crea un calor dérmico local y superficial en áreas delicadas con un control en tiempo real de la temperatura de la piel.

UniLarge: utiliza la energía de radiofrecuencia Unipolar para contraer las fibras de colágeno dentro de la piel y estimular la formación de nuevo colágeno.

UniFace: un cabezal de radiofrecuencia Unipolar diseñado especialmente para el tratamiento del rostro.

Periorbital: tensa y relaja la piel alrededor de los ojos.

TuneBody: radiofrecuencia fraccionada asistida por succión para tensar el cuerpo.

TuneFace: radiofrecuencia fraccionada asistida por succión para tensado de la piel del rostro.



Cortesía de Kee Lee Tan, Médico, Rejuvenate Clinic, Perth, Australia Occidental

Celulitis

Cabezales

UniForm: combina la tecnología de radiofrecuencia UniPolar de alta potencia con un aplicador mecánico para ofrecer un profundo calor dérmico incrementando el metabolismo dentro de los tejidos subcutáneos y mejorando la apariencia de la celulitis.

UniLarge: utiliza la energía de radiofrecuencia Unipolar para acelerar el metabolismo de los tejidos adiposos, suavizando la piel visiblemente.



Cortesía del Dr. JD Mc Coy, Contour Medical, Gilbert, Arizona

Alma Accent Prime

Love Your Shape

RÁPIDO, SEGURO, CÓMODO, SELECTIVO

Revela una nueva Silueta y destaca la Belleza Natural con Accent Prime para Cara y Cuerpo

REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DEL TIEMPO DEL TRATAMIENTO

TECNOLOGÍAS COMBINADAS PARA RESULTADOS MEJORADOS Y DURADEROS

CLÍNICAMENTE DEMOSTRADO EN UNA GRAN CANTIDAD DE ESTUDIOS


TECNOLOGÍA PLUG AND PLAY RÁPIDA Y FÁCIL DE UTILIZAR

SIN CONSUMIBLES

Últimas Innovaciones


Remodelación corporal de última generación que presenta los últimos avances tecnológicos.

UltraSpeed


 El cabezal UltraSpeed combina un nuevo tipo de tecnología de ultrasonidos que presenta en el aplicador una placa de gran tamaño para un remodelado corporal de alta velocidad. Es un dispositivo pionero de Alma, disponible exclusivamente en la plataforma Accent Prime. UltraSpeed presenta un sonotrodo en forma de plato que emite ondas ultrasónicas guiadas a través de perfiles concéntricos para calentar el tejido. La energía ultrasónica se distribuye homogéneamente por toda la zona de tratamiento, lo que altera eficazmente las células de grasa persistentes. El tiempo de tratamiento para todo el área abdominal se reduce a 20 minutos aproximadamente. Esto genera menor fatiga en el operador, mientras que el tamaño de la cuadrícula de 600 cm² cubre un área de tratamiento particularmente grande.

“El nuevo cabezal UltraSpeed ofrece un gran rango de cobertura para resultados óptimos. La histología presenta una evidencia clara de daño a los lipocitos en la hipodermis”.

Dr. Joseph Lepselter, Vicepresidente, Asuntos Clínicos, Alma Lasers

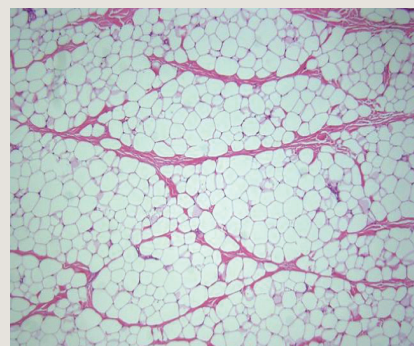


Lipocitos normales en la hipodermis

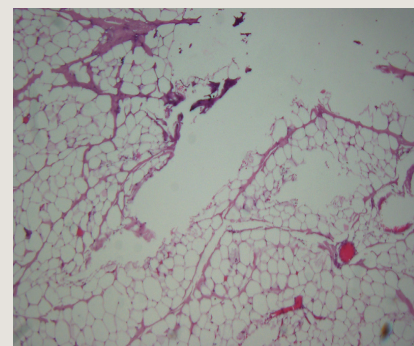

Anormal - Daño en los lipocitos

Tonificación Facial y Corporal

Accent Prime presenta nuevos cabezales fijos que funcionan con una alta potencia y que utilizan un mecanismo frío de succión por vacío para maximizar la eficacia del tratamiento. La tecnología de succión aísla el área de tratamiento, capturando los fluidos de los tejidos dentro de una única área definida, mientras que el enfriamiento por contacto protege la piel y reduce el dolor. A continuación, se utiliza la energía de radiofrecuencia para producir un choque térmico en el tejido, lo que genera un tratamiento más focalizado y concentrado. Esta combinación exclusiva reduce el tiempo de tratamiento y la cantidad de sesiones y ofrece resultados más potentes.

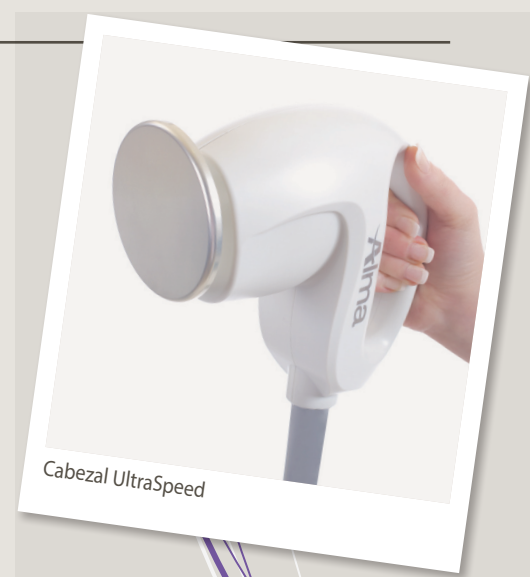


Cabezal UltraSpeed



RESULTADOS DURADEROS GRACIAS A LAS TECNOLOGÍAS COMBINADAS

Termoterapia dieléctrica efectiva

Accent Prime presenta la termoterapia dieléctrica, un mecanismo único en el cual la energía de radiofrecuencia se transmite directamente hacia el tejido, generando la rotación rápida de las moléculas de agua. Esta rotación genera fricción, que produce un calor fuerte y efectivo. Dado que la piel está formada mayormente por agua, el calentamiento proveniente de este mecanismo induce la contracción volumétrica dentro de la piel, contrayendo las fibras existentes y estimulando la formación de nuevo colágeno; esta acción mejora su espesor y alineamiento. Una alta frecuencia de RF permite un calentamiento profundo y homogéneo, que produce resultados uniformes.

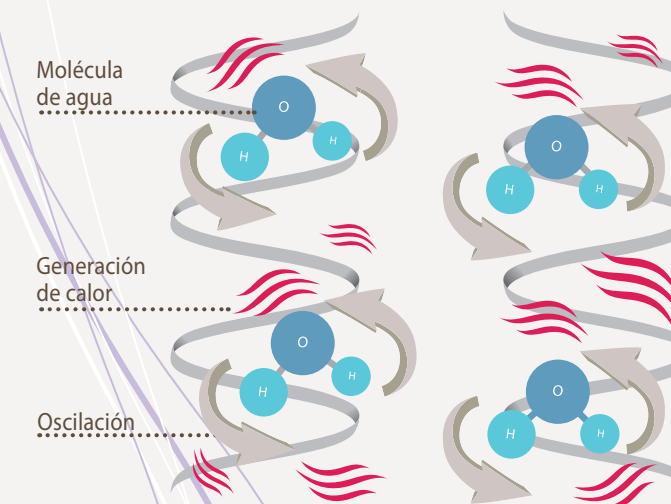

Potente adaptación de impedancia

Con una capacidad energética de hasta 300 vatios y una pérdida mínima de energía gracias a la adaptación de impedancia, Accent Prime ofrece una potencia máxima por cada tratamiento. Cuando la energía de la radiofrecuencia se transmite hacia el tejido, la resistencia eléctrica del cuerpo hace que la energía se refleje inversamente hacia la fuente energética. Gracias a su potencia máxima sin precedentes en el mercado, Accent Prime supera con efectividad la impedancia corporal, reduce así el reflejo y permite que la energía máxima de la radiofrecuencia sea absorbida por el tejido previsto.

Tecnología UniPolar profunda

La tecnología patentada¹ UniPolar de Alma permite un calentamiento focalizado, seguro y profundo del tejido en diversas profundidades de la piel. UniPolar funciona con un electrodo simple que emite una energía de radiofrecuencia focalizada que alcanza capas más profundas de la piel sin incomodar al paciente.

Control profundo focalizado

La tecnología de control profundo de Accent Prime le permite controlar la profundidad precisa del tratamiento, produciendo un calentamiento focalizado dentro de las capas relevantes de los tejidos. Mediante el control profundo variable, los profesionales cuentan con la flexibilidad y precisión para tratar el área prevista según la profundidad específica necesaria para obtener resultados óptimos. Los enfoques del tratamiento profundo y superficial también pueden combinarse para realizar un tratamiento totalmente personalizado, según el área de tratamiento, el tipo/espesor de la piel y la indicación. O, pueden combinarse en la misma área de tratamiento para ofrecer mejores resultados.

